

ANBEFALINGER FØR BRUK

Disse elektrodene må kun benyttes sammen med apparater som innfrir følgende spesifikasjoner:

- bifasiske alternerende strømpulser
- maksimal strømstyrke 150 mA med 500 Ohms impedanse.
- maksimum spenning +/-80 V
- gjennomsnittelig strømgiving under stimulering: 18,5 mA/cm²

PRODUKTBESKRIVELSE

PEN/2 penile elektroder er utformet for å behandle blære-ustabilitets problemer (hastverksinkontinens), impotens og smerter hos menn (TENS). Elektrodene skal sitte godt på plass og gjør det mulig å utføre stimulering både i stående og liggende posisjon.

Elektrodene består av to gummibånd med en regulerbar lukkemekanisme. Før du fester båndene på penis, er det greit å koble til den hvite ledningen til de to båndene. Bruk de største, hvite kontaktene til å feste på de svarte utstikkene på båndene. De andre, mindre hvite kontaktene skal festes til ledningen som går til apparatet.

PENILE ELEKTRODER


for
elektrostimulering og biofeedback



BRUKERINSTRUKSJON

Bruk litt gel (*gel følger med hvert apparat*) og smør inn de sorte båndene. Fest det ene båndet under penis roten og det andre over glans penis. Stram båndene godt, det er viktig at båndene har hudkontakt.

Skal du benytte elektrostimulering, kan du nå forsiktig skru opp strømstyrken på apparatet. Les mer om praktisk elektrostimulering og biofeedback i bruker-veiledningen som følger apparatet.

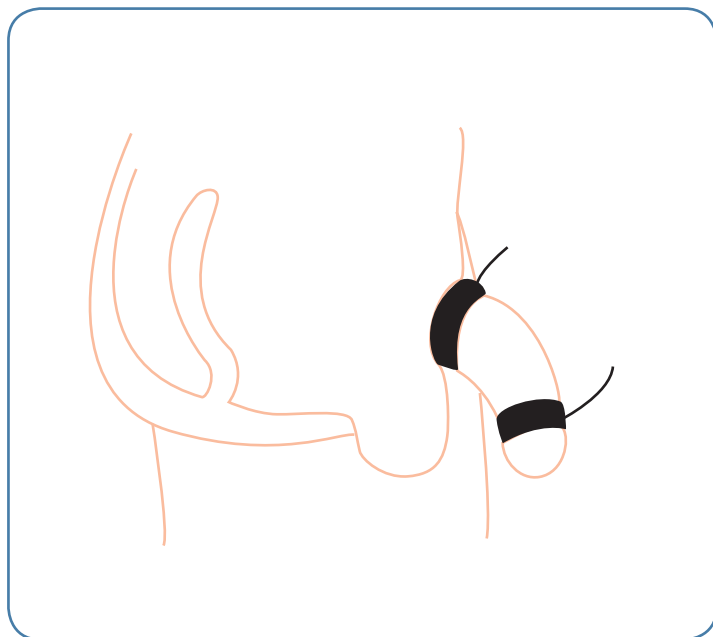

Tegningen viser korrekt plassering av de penile elektrodene

VEDLIKEHOLD

Elektrodene er personlige. Vask de etter hver gangs bruk med vann.

TID

Bruk ikke elektrodene mer enn 30 minutter i gangen (dette på grunn av fare for muskeluttretting).

KONTRAINDIKASJONER

Benytt ikke elektrodene dersom:

- det foreligger mistanke om blæreinfeksjon
- det foreligger mistanke om kreft i stimuleringsområdet (Urogenitalia/Colorektalt)
- bruker benytter hjerte pacemaker (konsultér lege som har foreskrevet pacemakere)
- ved hypotone blæretilstander.

FORSIKTIGHETSREGLER

Benytt ikke elektrodene i eller i nærheten av vann. Den korte, hvite ledningen bør ikke bli våt (ikke vask denne sammen med elektrodebåndene). Bruk ikke elektrodene sammen med høyfrekvent utstyr (risiko brannskader, det er trygt å benytte elektrodene med NeuroTrac apparatene). Elektrodene tåler ikke autoklaving.