

NeuroTrac TENS Obstetrics



TENS kan bidra til smertelindring under graviditet og fødsel, og ved etterrier, bekkenrelaterte smerter som bekkenløsning og menstruasjonssmerter.



TENS Obstetrics

Hei, jeg heter Kjersti og er jordmor.

I snart 20 år har jeg jobbet med gravide og fødende kvinner. Fødsel er hardt arbeid og riene vonde. God smertelindring gjør jobben mye lettere for deg som skal føde.

Når fødsel starter og riene melder seg kan du enkelt ta i bruk TENS-apparatet ditt. God smertelindring gjør det letter å bevege seg, slappe av så mye som mulig - og det gjør fødselen av barnet ditt lettere.

NeuroTrac TENS Obstetrics er et enkelt apparat som består av en kontrollenhet du holder i hånden, eller partner holder, og som er koblet til noen selvklebende pads som du setter på områdene nederst på mage eller på ryggen hvor du har smerter. Du kan selv øke styrken på de elektriske impulsene etterhvert som riene øker i styrke. TENS Obstetrics har ingen bivirkninger for barnet.

Du kan begynne å bruke ditt NeuroTrac TENS Obstetrics apparat mot bekkensmerter i svangerskapet.

Det er alltid lurt å leie, evt kjøpe, apparatet sitt i god tid (ca 1-2 mnd.) før fødsel. Da blir du godt kjent med det og det kan som nevnt brukes mot bekkensmerter.

Lykke til med ditt NeuroTrac TENS Obstetric apparat!



TENS Obstetrics


Tens Obstetrics gjør det lettere for deg å komme deg igjennom riene. De demper smerte og kan i stor grad redusere behovet for annen smertelindring slik som for eksempel epidural og andre medikamentelle smertelindrende tilbud som finnes ved sykehus.

God smertelindring bidrar også til mer bevegelse i fødsel som fremmer det naturlige fødselsforløpet.

Ta kontakt med oss på quintet.no for mer informasjon og for bestilling av ditt apparat.

Pris for leie: **760 kr,-** inkl. mva (inntil 2 mnd)

evt. kjøp: **2 285 kr,-** inkl. mva (rabattert pris). Bruk rabattkode OBST i nettbutikken (gjelder kun kjøp).

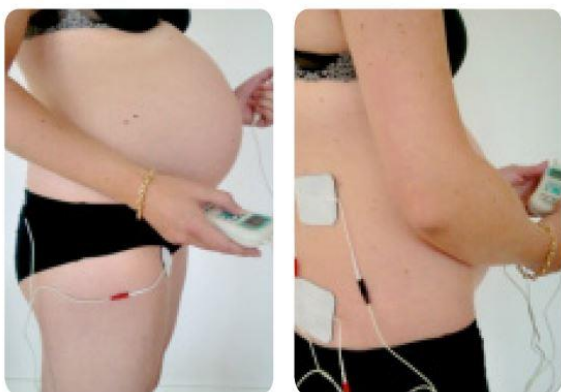

Elektrodeplassing:

Du fester enkelt pads over de smertefulle områdene i korsrygg og lyske.

Blir du svett i forbindelse med fødsel, kan en forsterke pads med f.eks. plastertape eller silketape.

Tekniske data:

To kanaler. Separerte isolerte kretser

Amplitude 0-80 mA

Pulsform Assymetrisk, rektangulær bifasisk puls

Pulsbredde 200-220uS

Program 1. Høyfrekvent: 90Hz
2. Lavfrekvent burst:
Burst bestående av 9 stk 150Hz pulseringer ved 200uS gjentatt to ganger i sek.
200-220uS

Ramp-up 0,8 sek. Intensiteten kan økes med 1,0 mA per tastetrykk. Håndomkobler for å veksle mellom programmene.

Vekt 140g inklusive batteri

TENS – mot etterrier / menstruasjonssmerter

Mange kvinner, særlig flergangsfødende sliter med etterrier etter fødsel. Disse kan være plagsomme, og TENS er effektivt mot disse smertene, som oppleves som kraftige menssmerter. TENS virker umiddelbart og du slipper dermed å planlegge inntak av smertestillende tabletter.

TENS Obstetrics har også dokumentert effekt mot kraftige menstruasjonssmerter.

Bestill ditt apparat og les mer på quintet.no

NeuroTrac TENS Obstetrics leveres med batteri, ledninger og 4 stk pads i størrelse 50x100 mm. En god brukerveiledning følger også med.

Vi tar gjerne imot spørsmål fra deg!

Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og seksuell helse.

Les gjerne mer på www.quintet.no



Følg oss gjerne på sosiale medier:



Quintet AS



quintet_as

Instagram