

## KONTRAINSİKASJONER

Benytt ikke elektroden dersom:

1. Det foreligger muskelsykdom
2. Blære eller vaginal infeksjon
3. Kreft i livmorhalsen
4. Hvis du har eller har hatt epilepsi
5. Bruker benytter hjerte pacemaker
6. Graviditet

## FORSIKTIGHETSREGLER

1. Hold enheten tørr og i avstand fra varmekilder
2. Skal ikke knyttes/brukes til høyfrekvente kirurgisk enheter
3. Proben skal kun brukes for kortere tidsbruk (3-6 mnd)
4. Ikke ta på de to elektrodene på proben med fingrene etter at apparat er skrudd på. Proben skal kun benyttes i skjeden.
5. Elektrodene inneholder spor av nikkel. Dette kan føre til en allergisk reaksjon ved overfølsomhet for nikkel

Merkelappen som er knyttet til ledningen på hver probe inneholder et "lot" nummer, navn på produsent og et CE nummer. Denne skal helst ikke fjernes. Ønsker du likevel å fjerne den (av for eksempl hygieniske årsaker), la merkelappen ligge igjen i posen og ta godt vare på den.



**Quintet AS**  
Postboks 97 Bønes  
5849 Bergen

☎ (+47) 55 98 15 55  
✉ [post@quintet.no](mailto:post@quintet.no)  
💻 [www.quintet.no](http://www.quintet.no)

# Vaginale elektroder

## Dynaprobe



Dynaprobe er en vaginal probe med to langsgående elektroder for stimulering/EMG måling av bekkenbunnmuskulatur og for behandling av urininkontinens.

Proben er personlig. Før og etter bruk må den vaskes med vann og evt en mild såpe. Sørg for at den er tørr før du legger den inn i posen igjen etter bruk. Tørk gjerne lett med et papirhåndkle. Ikke bruk produkter som inneholder alkohol til å rense proben. Den skal heller ikke steriliseres. Sørg for at stimulering er skrudd av før du setter inn og tar ut proben.