

Anale elektroder

PRODUKTBESKRIVELSE

Analia og Analys+ anale elektroder er utformet for å behandle forskjellige former for inkontinens. Elektrodene kan benyttes både i forbindelse med elektrostimulering og biofeedback.

Elektrodene skal sitte godt på plass og gjør det mulig å utføre stimulering både i stående og liggende posisjon.

De hvite kontaktene skal festes til ledningen som går til apparatet.

FORSIKTIGHETSREGLER

Benytt ikke elektrodene i eller i nærheten av vann. Den korte, hvite ledningen bør ikke bli våt. Bruk ikke elektrodene sammen med høyfrekvent utstyr (risiko brannskader; det er trygt å benytte elektrodene med NeuroTrac apparatene). Elektrodene tåler ikke autoklaving.



Quintet AS, Postboks 97 Bønes, N-5849 Bergen
Telefon: (+47) 55 98 15 55 / Fax: (+47) 55 98 15 56 / post@quintet.no

Anale elektroder

ANALYS+ / ANALIA ELEKTRODER for elektrostimulering og biofeedback



www.quintet.no

Kontraindikasjoner



Benytt ikke elektrodene dersom:

- det foreligger mistanke om blæreinfeksjon
- det foreligger mistanke om kreft i stimuleringsområdet (Urogenitalia/Colorektalt)
- det foreligger graviditet
- bruker benytter hjerte pacemaker (konsultér lege som har foreskrevet pacemakeren)
- ved hypotone blæretilstander.

Anbefalinger før bruk

Disse elektrodene må kun benyttes sammen med apparater som innfrir følgende spesifikasjoner:

- bifasiske alternerende strømpulser
- maksimal strømstyrke 150 mA med 500 Ohms impedanse.
- maksimum spenning +/-80V

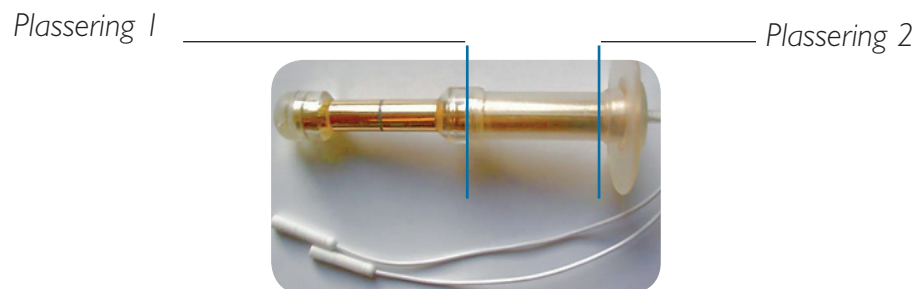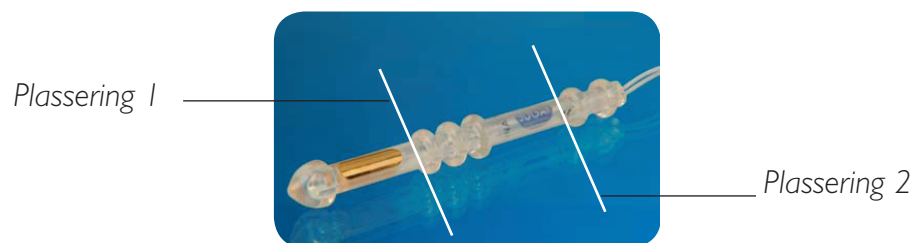

BRUKERINSTRUKSJON

Bruk litt gel (gel følger med hvert apparat) på tuppen av elektroden før innføring i endetarmen.

Plassering av probe ved trening med biofeedbackapparat:

Ved trening av m. puborectalis, anbefales det å plassere Analia / Analys+ til plastring i enden av proben. (Plassering 2)

Ved vurdering av EMG aktivitet eller trening av selve sphinkter, anbefales Analia / Analys+ applisert inntil overgangen (midt på proben). (Plassering 1)

Plassering av probe ved elektrostimulering:

Plassering 1

Analia / Analys+ plasseres inntil overgangen (midten på proben) hvis en ønsker å stimulere den nedre del av analkanalen (eksterne analsphincter).

Plassering 2

Analia / Analys+ plasseres inntil plastringen i enden dersom en ønsker å stimulere m. puborectalis (levator ani).

Skrud ALLTID strømstyrken forsiktig opp.

Vedlikehold

Elektrodene er personlige. Vask de etter hver gangs bruk med vann.

Bruk ikke elektrodene mer enn 30 minutter i gangen (dette på grunn av fare for muskelutretting).