



Generelt om øreklips

Våre øreklips kan brukes på de fleste TENS og TEMS-apparater på det norske markedet.

Før bruk: Huden må være ren og tørr. Tørk gjerne av huden med såpe og vann der hvor elektrodene skal festes. Unngå bruk av desinfeksjonsmiddel eller annen form for rengjøring, da dette kan skade huden. Fukt gjerne karbonfiberplaten lett ved å ta litt vann på fingeren.

Etter bruk: Vask gjerne lett av øreklipsen og sett den tilbake i posen. Av hygieniske årsaker skal elektrodene kun benyttes av én person.

Oppbevaring: Oppbevares i romtemperatur, gjerne i lukket pose.

Levetid: Elektrodenes levetid kan variere sterkt, og avhenger av bruk. Dersom elektrodene viser tegn til slitasje eller skade bør de leveres til gjenvinning.

Tekniske spesifikasjoner

- Materiale: ABS plast, elektrodeplate: silicon, naturgummi og karbonfiber.
- Lateksfri
- Kobling: 2 mm
- Vekt per klips: 1,6 g
- Størrelse: 40 mm lende, 13 mm maksimum bredde
- CE-merket

Som standard leveres øreklips sammen med en 50 x 50 mm hudelektrode til vagusnervestimulering. Øreklipsene kan også bestilles enkeltvis.